

Yer – Yüzey Dezenfektanları

DERDEVICE PLUS Y

- Aldehitsiz
- 1/300 oranında çok ekonomik seyreltme
- Deterjan ve dezenfektan özellikleri mükemmel sinerji
- Çift aksiyon: eşzamanlı işlemde deterjan ve dezenfektan aksiyon kombinasyonu
- Geniş bir malzeme yelpazesi ile mükemmel uyumluluk
- Hızlı etki - 5 dakika da etkili
- Seyreltilmiş olduğunda çevre için tehlikeli sınıfına girmez
- Her tür kalitede su ile etkinlik gösterir
- Hoş kokulu
- Kalıntı ve leke oluşturmaz
- Hızlı Kuruma
- Anti-korozif
- Non-toksik
- Geniş antimikrobiyal aktivite



Kullanım Alanı ve Amacı

Bileşimindeki kuarterner amonyum bileşikleri sayesinde antimikrobiyal etki spektrumu geniştir. Hastanelerdeki tüm yatay ve dikey yüzeylerin; özellikle PVC/ epoksi alanların, yerlerin, duvarların, ameliyathanelerin, yoğun bakım odalarının temizliğinde ve dezenfeksiyonunda kullanılır. Derdevice Plus Y, cam, tahta, seramik, silikon, plastik (pleksiglas dahil), paslanmaz çelik malzemeyle uyumludur.

Kullanım Şekli

1/300 oranında seyreltilmiş solüsyon dezenfeksiyon ve temizlik yapılacak yüzeye ovalama ve silme metoduyla uygulanır.

Kimyasal İçerik

Didesil Dimetil Amonyum Klorür, Benzalkonyum Klorür, Noniyonik Maddeler, Antikorozyf Maddeler, Deiyonize Su.

Mikrobiyolojik Etkisi

Bakterisid, Virüs, Fungusid, Tüberkülosid, Mikobakterisid

Ambalaj

4x5L – 12x1L



BİO-TEMİZLİK NEDİR ?

Hastanelerde, görsel kirlilik ile mikrobiyal temizliği birbirinden ayırmak esastır. Görsel veya makroskopik temizlikte çatlaklar, kırıklarda görünür kir olmaması önemlidir. Mikrobiyal temizlik görsel olarak gözlemlenemez, ancak yüzeyden alınan örneklerin mikroskop altında incelenmesi sonucu mikroorganizmalar görülebilir. Bir yüzey, görünürde temiz olup mikroskopik düzeyde yoğun kontaminasyona sahip olabilir.

ÇEVRE TEMİZLİĞİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Mikroorganizmalar (bakteri, fungus, virüsler) çevremizde mevcuttur ve enfeksiyona neden olabilmektedirler. MDRB ve HRB bakteriler: Acinetobacter baumannii, MRSA, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, VRE, Klebsiella pneumoniae, OXA48, Escherichia coli, OXA48. Çevre bu mikroorganizmaların üreme alanı olarak hizmet edebilir. Yüzeyler ve medikal aletler için, özellikle sık sık dokunulan yüzeylerde mikroorganizmaları azaltmak için temizlik ve dezenfeksiyon gereklidir.



DERDEVICE PP

- Aldehitsiz
- Kullanıma hazır
- Formülasyonu etanola dayalı
- Hızlı etki - 30 saniye de etkili
- Kısa temas süresi - Geniş etki spektrumu
- Renksiz
- Hızlı Kuruma
- Kalıntı ve leke oluşturmaz
- Kontrollü dezenfeksiyon hacmi
- Kapalı sistem ile kutu içindeki mendiller kurumaz
- Küçük ve büyük yüzeyler için adapte edilmiş mendil boyutu
- Mendil formu olması nedeniyle kullanım kolaylığı sağlar.



Kullanım Alanı ve Amacı

Sıvı temasının uygun olmadığı ve hızlı dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan cihazların, hızlı dezenfeksiyonunda kullanılır. Mendil formu olması nedeniyle kullanım kolaylığı sağlar. Derdevice PP Dezenfektan Mendil, Diş ünitelerinde (dental ayretörler ve mikro motor başlıkları) ve hasta teması olan hızlı dezenfeksiyonu gereken tıbbi cihazların (Ultrason problemleri, küvözler) silinerek hızlı dezenfekte edilmelerinde kullanılır. Silikon, plastik, PVC, akrilik, polimer, polikarbon, polistren, HDPE, ve paslanmaz çelik malzemelerle uyumludur.

Kullanım Şekli

Dezenfekte edilecek yüzeyler Derdevice PP Dezenfektan Mendil ile silinerek etki süresi kadar beklenir, ayrıca kurulamaya gerek yoktur.

Kimyasal İçerik

Etil Alkol, Propan-2-ol, Didesil Dimetil Amonyum Klorür, Koruyucu Katkıları, Parfüm, Deiyonize su

Mikrobiyolojik Etkisi

Bakterisid, Virüs, Fungusid, Tüberkülosid, Mikobakterisid



Yer – Yüzey Dezenfektanları

DERDEVICE

- Kullanıma hazır
- Alkolsüz veya aldehitsiz formülasyon
- Deterjan ve dezenfektan özellikleri mükemmel sinerji
- Geniş bir malzeme yelpazesi ile mükemmel uyumluluk
- Geniş etki spektrumu
- Hızlı etki - 30 saniye de etkili
- Parfümsüz ve renksiz
- Kalıntı ve leke oluşturmaz
- Yüzeylerde yüksek ve uzun kalıcı performans
- Kolay kullanım
- Durulama gerektirmez



Kullanım Alanı ve Amacı

Derdevice, Ultrason propları, küvözler, dental alanda kullanılan aeratörler ve mikromotor başlıkları, KBB ünitelerinde kullanılan dezenfeksiyonu zorunlu tıbbi cihazların tıbbi cihaz ve makinelerin temizliğini, aynı zamanda dezenfeksiyonunu etkili ve hızlı şekilde sağlayan bir üründür. Derdevice, cam, seramik, silikon, plastik (pleksiglas dahil), tahta ve paslanmaz çelik malzeme ile uyumludur.

Kullanım Şekli

Derdevice, tüm yatay ve dikey yüzeylere uygun, kullanıma hazır püskürtme dezenfektanıdır. 30 cm mesafeden püskürtülür. Temiz bir bezle silinir ve kurumaya bırakılır.

Kimyasal İçerik

Didesil Dimetil Amonyum Klorür (DDAC), Benzalkonyum Klorür, Fenoksietanol, Deiyonize Su.

Mikrobiyolojik Etkisi

Bakterisid, Virüs, Fungusid, Tüberkülosid, Mikobakterisid

Ambalaj

4x5L – 12x1L

DERDEVICE P50

- Aldehitsiz
- Kullanıma hazır
- Formülasyonu etanola dayalı
- Hızlı etki - 30 saniye de etkili
- Kısa temas süresi - Geniş etki spektrumu
- Renksiz
- Hızlı kuruma, Kolay kullanım
- Kalıntı ve leke oluşturmaz



Kullanım Alanı ve Amacı

Derdevice P50, hasta yatakları, küvözler, diş üniteleri, ayretörler, ameliyat masaları, serum askısı, hasta başı monitörleri, sedye ve ambulanslar, hasta cildi ile temas eden tıbbi aletler (steteskop, tansiyon aleti vb.), sıklıkla el ve vücut temasının olduğu alanlar (klozet, lavabo, kapı kolu, musluk vb), silinebilir tüm yatay ve dikey yüzeylerin temizliği ve dezenfeksiyonunda kullanılır.

Kullanım Şekli

Derdevice P50, tüm yatay ve dikey yüzeylere uygun, kullanıma hazır püskürtme dezenfektanıdır. 30 cm mesafeden yüzeyi kaplayacak kadar püskürtülür. Temiz bir bezle silinir ve kurumaya bırakılır.

Kimyasal İçerik

Etil Alkol(Etanol), Propan-2-ol (İzopropil Alkol), Didesil Dimetil Amonyum Klorür, Parfüm, Deiyonize su

Mikrobiyolojik Etkisi

Bakterisid, Virüs, Fungusid, Tüberkülosid

Ambalaj

4x5L – 12x1L

Düşük – Orta Düzey Dezenfeksiyon

DERDEVICE ENZYM

- Aldehitsiz
- Konsantre, Ekonomik Seyreltme Oranı %0,5
- Optimum temizlik için üçlü enzim formülasyonu
- Hassas ve pahalı enstrümantasyon için ideal
- Hızlı temizleme işlemi - 5 dakika içinde etkili
- 24 saat aktivite
- Manuel ve otomatik temizleme için kullanılabilir
- Seyreltilmiş olduğunda çevre için tehlikeli sınıfına girmez
- Anti-korozif



ÖN DEZENFEKSİYON AŞAMASI ÇOK ÖNEMLİDİR.

Mikroorganizma popülasyonunu azaltmaktadır. Hastalar ve personel için çapraz kontaminasyon riskini azaltmaktadır. Çevrenin kirlenmesi önlenmektedir. Dezenfeksiyonun etkinliğini arttırmaktadır. Temizlenmesi güç olabilecek kan ve biyolojik sıvıların kurumasını önler.

Kullanım Alanı ve Amacı

Derdevice ENZYM, Her türlü girişimsel cerrahi aletler, dental cerrahi aletler, cerrahi laparoskopi aletleri, flexible ve rijid endoskoplara temizliği ve ön dezenfeksiyonunu sağlar. Yüzeylerdeki kan, yağ, protein, nişasta gibi organik atıkları temizleyerek, daha etkili bir dezenfeksiyon işlemi sağlar. Her türlü endoskop markasıyla kullanıma uygundur. Endoskop yıkama makinelerinde, ultrasonik yıkama makinelerinde ve manuel kullanıma uygundur. cam, seramik, silikon, plastik, PVC, akrilik, polimer, polikarbon, polistren, HDPE, porselen ve paslanmaz çelik malzemelerle uyumludur. Antikorozyf etkilidir.

Kullanım Şekli

Küvet içerisine, 15-45°C ısıda ve uygun oranda su koyunuz. Derdevice Enzym aletlerdeki kirlilik derecesine göre seyreltilerek kullanılır. Dozaj pompası ile kirlilik derecesine göre önerilen konsantrasyonda Derdevice Enzym ekleyiniz. Aletleri demonte ederek, tüm yüzeyleri solüsyonla temas edecek şekilde küvete yerleştiriniz. Çıkmayan organik kirleri, orta sertlikte bir fırça yardımı ile fırçalayınız. Küvetin ağzını kapatınız. Etki süresi kadar bekledikten sonra, aletleri solüsyondan çıkarınız ve bol su ile durulayınız. Hazırlanan solüsyonun kullanım süresi 24 saattir. Ancak gözle görülen kirlilik oluştuğunda değiştirilmesi tavsiye edilir.

Su Miktarı	Derdevice Enzym Miktarı (%0,5)	Derdevice Enzym Miktarı (%1,0)	Derdevice Enzym Miktarı (%3)
5L	25 ml	50 ml	150 ml
10L	50 ml	100 ml	300 ml
15L	75 ml	150 ml	450 ml
20L	100 ml	200 ml	600 ml

Kimyasal İçerik

Enzim (amilaz, proteaz, lipaz), Glikol, Noniyonik sürfaktanlar, Kuarterner Amonyum bileşikler, Antikorozyf maddeler, Deiyonize su

Mikrobiyolojik Etkisi

Bakterisid, Virüs, Fungusid, Tüberkülosid, Mikobakterisid

Ambalaj

4x5L – 12x1L



Yüksek Düzey Dezenfeksiyon

DERDEVICE PLUS PAA

- Aldehitsiz
- Perasetik asit ve hidrojen peroksit tabanlı bir çözüm
- Aktivasyonundan sonra kullanıma hazır
- 5 dakika da sporisidal etkinlik
- Ön temizliği yapılmış aletler için kullanılır
- 14 gün boyunca kullanım ve etkili
- Test stripleri ile kolay kontrol
- Manuel ve otomatik dezenfeksiyon için kullanılabilir
- Geniş materyal uyumluluğu
- Renksiz
- Koksuz



Kullanım Alanı ve Amacı

Her türlü girişimsel cerrahi aletler, dental cerrahi aletler, cerrahi laparoskopi aletleri, flexible ve rijid endoskopların yüksek düzey dezenfeksiyonunu sağlar. Cam, seramik, silikon, plastik, PVC, akrilik, polimer, polikarbon, polistren, HDPE, porselen ve paslanmaz çelik malzemelerden yapılmış tıbbi cihazların dezenfeksiyonuna uygundur. Antikorozyf etkilidir. Her türlü endoskop markasıyla kullanıma uygundur. Aldehit, fenol ve kuarternar amonyum bileşiği içermez. Endoskop yıkama makinelerinde, ultrasonik yıkama makinelerinde ve alet dezenfeksiyon kuvvetlerinde kullanıma uygundur.

Kullanım Şekli

Solüsyon, baz ile aktiveleştiricinin karıştırılması ile hazırlanır. Aktivatör şişesinin tüm içeriğini baz bidonuna boşaltınız. İyice çalkalayınız. Solüsyonu dezenfektan kuvvetine doldurunuz. Derdevice Enzym ile ön temizliği yapılmış aletleri demonte ederek, tüm yüzeyleri solüsyonla temas edecek şekilde kuvete yerleştiriniz. Kuvetin ağzını kapatınız. Etki süresi kadar bekledikten sonra, aletleri solüsyondan çıkarınız ve bol su ile durulayınız. Solüsyonun etkinliği test stripleri ile kontrol edilmelidir. Solüsyonda gözle görülür bir kirlilik oluştuğunda değiştirilmesi tavsiye edilir.

Kimyasal İçerik

Perasetik asit, Hidrojen peroksit, Antikorozyf maddeler, Deiyonize su

Mikrobiyolojik Etkisi

Bakterisid, Virüs, Sporid, Fungusid, Mikobakterisid, Tüberkülosid

Ambalaj

4x5L



DERDEVICE PLUS HP

- Konsantre
- Geniş antimikrobiyal aktivite
- Spesifik test stripleri
- Uzun stabilite
- Antikorozyf etkilidir



Kullanım Alanı ve Amacı

Derdevice PLUS HP, Her türlü girişimsel cerrahi aletler, dental cerrahi aletler, cerrahi laparoskopi aletleri, flexible ve rijid endoskopların yüksek düzey dezenfeksiyonunu sağlar. Endoskop kılıflarında paslanma, korozyon, yumuşama, renk değişikliği gibi zedelenmelere neden olmaz. Cam, seramik, silikon, plastik, PVC, akrilik, polimer, polikarbon, polistren, HDPE, porselen ve paslanmaz çelik malzemelerden yapılmış tıbbi cihazların dezenfeksiyonuna uygundur. Antikorozyf etkilidir. Her türlü endoskop markasıyla kullanıma uygundur. Endoskop yıkama makinelerinde ve manuel kullanıma uygundur.

Kullanım Şekli

Seyreltilerek kullanılır. Solüsyonu hazırlamak için dozaj pompasını kullanınız. Dezenfektan kuvvetine su doldurunuz. Seyreltme tablosuna bakarak Derdevice Plus HP ekleyiniz. Derdevice Enzym ile ön temizliği yapılmış aletleri demonte ederek, tüm yüzeyleri ve boşlukları solüsyonla temas edecek şekilde kaba yerleştiriniz. Kuvetin ağzını kapatınız. Etki süresi kadar bekledikten sonra, aletleri solüsyondan çıkarınız ve bol su ile durulayınız. Solüsyonun etkinliği test stripleri ile kontrol edilmelidir. Solüsyonda gözle görülür bir kirlilik oluştuğunda değiştirilmesi tavsiye edilir.

Kimyasal İçerik

Hidrojen peroksit, Perasetik asit, Asetik asit, Stabilizatör, Antikorozyf maddeler, Deiyonize su

Mikrobiyolojik Etkisi

Bakterisid, Virüs, Sporid, Fungusid, Mikobakterisid, Tüberkülosid

Ambalaj

4x5L

DERDEVICE PLUS OPA

- Ortho-phthalaldehyde tabanlı bir çözüm
- Kullanıma hazır – Karıştırma gerektirmez
- 5 dakika da sporisidal etkinlik
- Pahalı ve hassas endoskopik malzemeler için uygun
- Ön temizliği yapılmış aletler için kullanılır
- 14 gün boyunca kullanım ve etkili
- Test stripleri ile kolay kontrol
- Manuel ve otomatik dezenfeksiyon için kullanılabilir
- Geniş malzeme uyumu
- Renksiz
- Kokusuz



Kullanım Alanı ve Amacı

Her türlü girişimsel cerrahi aletler, dental cerrahi aletler, cerrahi laparoskopi aletleri, flexible ve rigid endoskopların yüksek düzey dezenfeksiyonunu sağlar. Endoskop kılıflarında paslanma, korozyon, yumuşama, renk değişikliği gibi zedelenmelere neden olmaz. Cam, seramik, silikon, plastik, PVC, akrilik, polimer, polikarbon, polistren, HDPE, porselen ve paslanmaz çelik malzemelerden yapılmış tıbbi cihazların dezenfeksiyonuna uygundur. Antikorozyf etkilidir. Her türlü endoskop markasıyla kullanıma uygundur. Endoskop yıkama makinelerinde ve manuel kullanıma uygundur.

Kullanım Şekli

Kullanıma hazırdır, seyreltmeyiniz. Solüsyonu dezenfektan küvetine doldurunuz. Derdevice Enzym ile ön temizliği yapılmış aletleri demonte ederek, tüm yüzeyleri solüsyonla temas edecek şekilde küvete yerleştiriniz. Küvetin ağzını kapatınız. Etki süresi kadar bekledikten sonra, aletleri solüsyondan çıkarınız ve bol su ile durulayınız. Solüsyonun etkinliği test stripleri ile kontrol edilmelidir. Solüsyonda gözle görülür bir kirlilik oluştuğunda değiştirilmesi tavsiye edilir. Etkisini kaybetmiş solüsyona, 5L için 30 g Glisin karıştırarak, resmi yönetmeliklere uygun bertaraf edilir.

Kimyasal İçerik

% 0,55 Orthophthalaldehyde, Antikorozyf Maddeler, Deiyonize Su

Mikrobiyolojik Etkisi

Bakterisid, Virüs, Sporid, Fungusid, Mikobakterisid, Tüberkülosid

Ambalaj

4x5L



DERDEVICE PLUS A2

- Aktivasyon sonrası kullanıma hazır
- Geniş antimikrobiyal aktivite
- Spesifik test stripleri
- Uzun stabilite: 28 gün
- Antikorozyf etkilidir



Kullanım Alanı ve Amacı

Her türlü girişimsel cerrahi aletler, dental cerrahi aletler, cerrahi laparoskopi aletleri, flexible ve rigid endoskopların yüksek düzey dezenfeksiyonunu sağlar. Aletlerde paslanma, korozyon, endoskop kılıflarında yumuşama, renk değişikliği gibi zedelenmelere neden olmaz. Cam, seramik, silikon, plastik, PVC, akrilik, polimer, polikarbon, polistren, HDPE, porselen ve paslanmaz çelik malzemelerle uyumludur. Antikorozyf etkilidir. Her türlü endoskop markasıyla kullanıma uygundur. Endoskop yıkama makinelerinde ve manuel kullanıma uygundur.

Kullanım Şekli

Solüsyon, baz ile aktifleştiricinin karıştırılması ile hazırlanır. Aktivatör şişesinin tüm içeriğini baz bidonuna boşaltınız. İyiçe çalkalayınız. Solüsyonu dezenfektan küvetine doldurunuz. Derdevice Enzym ile ön temizliği yapılmış aletleri demonte ederek, tüm yüzeyleri solüsyonla temas edecek şekilde küvete yerleştiriniz. Küvetin ağzını kapatınız. Etki süresi kadar bekledikten sonra, aletleri solüsyondan çıkarınız ve bol su ile durulayınız. Solüsyonun etkinliği test stripleri ile kontrol edilmelidir. Solüsyonda gözle görülür bir kirlilik oluştuğunda değiştirilmesi tavsiye edilir. Etkisini kaybetmiş solüsyona, 5L için 200 g Sodyum Bi Sülfat karıştırarak resmi yönetmeliklere uygun bertaraf edilir.

Kimyasal İçerik

%2 Glutaraldehyt, Antikorozyf Maddeler, Deiyonize Su

Mikrobiyolojik Etkisi

Bakterisid, Virüs, Sporid, Fungusid, Mikobakterisid, Tüberkülosid

Ambalaj

4x5L

Yıkama ve Dezenfeksiyon Makinesi Ürünleri

DERDEVICE ENZYM

- Aldehitsiz
- Ekonomik Seyreltme Oranı %0,5
- Optimum temizlik için üçlü enzim formülasyonu
- Hassas ve pahalı enstrümantasyon için ideal
- Hızlı temizleme işlemi - 5 dakika içinde etkili
- 24 saat aktivite
- Manuel ve otomatik temizleme için kullanılabilir
- Seyreltilmiş olduğunda çevre için tehlikeli sınıfına girmez
- Anti-korozif



Kullanım Alanı ve Amacı

Derdevice ENZYM, Her türlü girişimsel cerrahi aletler, dental cerrahi aletler, cerrahi laparoskopi aletleri, flexible ve rijid endoskopların temizliği ve ön dezenfeksiyonunu sağlar. Yüzeylerdeki kan, yağ, protein, nişasta gibi organik atıkları temizleyerek, daha etkili bir dezenfeksiyon işlemi sağlar. Her türlü endoskop markasıyla kullanıma uygundur. Endoskop yıkama makinelerinde, ultrasonik yıkama makinelerinde ve manuel kullanıma uygundur. Cam, seramik, silikon, plastik, PVC, akrilik, polimer, polikarbon, polistren, HDPE, porselen ve paslanmaz çelik malzemelerle uyumludur. Antikorozyf etkilidir.

Kullanım Şekli

Küvet içerisine, 15-45°C ısıda ve uygun oranda su koyunuz. Derdevice Enzim aletlerdeki kirlilik derecesine göre seyreltilerek kullanınız. Dozaj pompası ile kirlilik derecesine göre önerilen konsantrasyonda Derdevice Enzim ekleyiniz. Aletleri demonte ederek, tüm yüzeyleri solüsyonla temas edecek şekilde küvete yerleştiriniz. Çıkmayan kirleri, orta sertlikte bir fırça yardımı ile fırçalayınız. Küvetin ağzını kapatınız. Etki süresi kadar bekledikten sonra, aletleri solüsyondan çıkarınız ve bol su ile durulayınız. Hazırlanan solüsyonun kullanım süresi 24 saattir. Ancak gözle görülen kirlilik oluştuğunda değiştirilmesi tavsiye edilir.

Su Miktarı	Derdevice Enzim Miktarı (%0,5)	Derdevice Enzim Miktarı (%1,0)	Derdevice Enzim Miktarı (%3)
5L	25 ml	50 ml	150 ml
10L	50 ml	100 ml	300 ml
15L	75 ml	150 ml	450 ml
20L	100 ml	200 ml	600 ml

Kimyasal İçerik

Enzim (amilaz, proteaz, lipaz), Glükol, Noniyonik sürfaktanlar, Kuarterner amonyum bileşikler, Antikorozyf maddeler, Deiyonize su

Mikrobiyolojik Etkisi

Bakterisid, Virüsüd, Fungusid, Tüberkülosid, Mikobakterisid

Ambalaj

4x5L – 12x1L

DERCLEANER A

- Konsantre
- Yüksek performanslı deterjan
- Her tür kalitede su ile etkinlik gösterir
- Kısa döngü konteynırların yıkanması için de uygundur
- Minerallere karşı kompleks etki



Kullanım Alanı ve Amacı

Dercleaner A, yıkama makinelerinin termal ve kemotermal proseslerinde alkali temizleme işleminde kullanılan ana yıkama solüsyonudur. Isıya dayanıklı tıbbi alet ve laboratuvar malzemelerinin yüksek sıcaklıkta (93°C) temizliğini sağlarken, ısıya dayanıksız elastomer, kauçuk, plastik gibi maddelerden yapılmış aletlerin düşük sıcaklıkta (50-60°C) temizliğini sağlar. Farklı su sertliklerinde etkilidir. Köpürmez, makine parçalarına zarar vermez. Cam, seramik, plastik, elastomer, kauçuk, alüminyum ve paslanmaz çelik malzemeyle uyumludur. PH değeri 11-14

Kullanım Şekli

Tüm yıkama makineleri ve dezenfektörlerde kullanıma uygundur. Farklı su sertlik derecelerinde kullanıma uygundur. Otomatik alet yıkama makinelerinde, kirlilik oranına ve su kalitesine bağlı olarak, % 0,2-% 0,5 (2-5 ml/L) oranında otomatik sulandırılarak kullanılır. Dozajlama bilgisi için makine üreticisinin tavsiyesine uyunuz. Tüm yıkama makineleri ile kullanıma uygundur.

1 birim Dercleaner A kullanıldığında, ½ birim Nötralizan kullanınız.

Kimyasal İçerik

Potasyum hidroksit, Kompleks yapıcılar, Silikatlar, Koruyucular ve Deiyonize su

Ambalaj

3x5L



Yıkama ve Dezenfeksiyon Makinesi Ürünleri

DERCLEANER NF

- Konsantre
- Yüksek performanslı deterjan
- Her tür kalitede su ile etkinlik gösterir
- Alkali kalıntıları nötrale eder



Kullanım Alanı ve Amacı

Dercleaner NF, yıkama makinelerinin termal ve kemoterml prosesinde alkali temizlik sonrası nötralizasyon işleminde kullanılır. Organik asit içerir. Hastaneler ve tıbbi kurumlardaki cerrahi aletlerin, bükülemez endoskoplara, MIC cihazlarının, anestezi aletlerinin alkali temizlenmesinden sonra, geriye kalan alkali artıkların nötralizasyonu (40-60°C) ve kireç kalıntılarının uzaklaştırılması için kullanılır. Ayrıca aletler üzerindeki pas, kireç ve tortuları çözerek yenilenmesini sağlar. Temizlik işlemi sırasında, albüminler, organik bazlar, karbonatlar ve hidroksitler çözülür. Cam, seramik, plastik, elastomer, kauçuk ve paslanmaz çelik malzemeyle uyumludur. pH değeri 1-3

Kullanım Şekli

Tüm yıkayıcı ve dezenfektörlerde kullanıma uygundur. Farklı su sertliklerinde etkilidir. Kirlilik oranı ve su kalitesine bağlı %0,1-%0,3 (1-3 ml/L) oranında otomatik sulandırılarak kullanılır. Dozajlama bilgisi için makine üreticisinin tavsiyesine uyunuz. 1 birim Dercleaner A kullanıldığında, ½ birim Dercleaner NF kullanılır.

Kimyasal İçerik

Fosforik asit, Antikorozyf maddeler, Deiyonize su.

Ambalaj

3x5L

DERCLEANER NS

- Konsantre
- Yüksek performanslı deterjan
- Her tür kalitede su ile etkinlik gösterir
- Alkali kalıntıları nötrale eder



Kullanım Alanı ve Amacı

Dercleaner NS, yıkama makinelerinin termal ve kemoterml prosesinde alkali temizlik sonrası nötralizasyon işleminde kullanılır. Organik asit içerir. Hastaneler ve tıbbi kurumlardaki cerrahi aletlerin, bükülemez endoskoplara, MIC cihazlarının, anestezi aletlerinin alkali temizlenmesinden sonra, geriye kalan alkali artıkların nötralizasyonu (40-60°C) ve kireç kalıntılarının uzaklaştırılması için kullanılır. Ayrıca aletler üzerindeki pas, kireç ve tortuları çözerek yenilenmesini sağlar. Temizlik işlemi sırasında, albüminler, organik bazlar, karbonatlar ve hidroksitler çözülür. Cam, seramik, plastik, elastomer, kauçuk ve paslanmaz çelik malzemeyle uyumludur. pH değeri 1-3

Kullanım Şekli

Tüm yıkayıcı ve dezenfektörlerde kullanıma uygundur. Farklı su sertliklerinde etkilidir. Kirlilik oranına ve su kalitesine bağlı olarak, %0,1-%0,3 (1-3 ml/L) oranında otomatik sulandırılarak kullanılır. Dozajlama bilgisi için makine üreticisinin tavsiyesine uyunuz. 1 birim Dercleaner A kullanıldığında, ½ birim Dercleaner NS kullanılır.

Kimyasal İçerik

Sitrik asit, Noniyonik maddeler, Antikorozyf maddeler, Deiyonize su

Ambalaj

3x5L

DERDEVICE PAS VE KOROZYON GİDERİCİ

- Konsantre
- Yüksek performanslı deterjan
- Her tür kalitede su ile etkinlik gösterir
- Alkali kalıntıları nötrale eder



Kullanım Alanı ve Amacı

Derdevice Pas ve Korozyon Giderici; tıbbi aletler üzerindeki leke, korozyon ve pası giderir. Cerrahi, anestezi, laboratuvar malzemeleri, diş hekimliği gibi bir çok alanda kullanılabilir. Ultrasonik yıkama makineleri ve manuel yıkamada kullanıma uygundur.

Kullanım Şekli

Derdevice Pas ve Korozyon Giderici; temizlenecek yüzeyin pas durumuna göre %0,1; %0,5; %1,0; %2,0; %3,0, %5 ve %10 oranlarda seyreltilerek kullanılır. Uygun oranda seyreltilen ürün bir kaba doldurulur, paslı aletler tüm yüzeyi solüsyonla temas edecek şekilde kaba daldırılır minimum 5 maksimum 10 dakika beklenir, çıkmayan pas ve kirliler orta sertlikteki bir fırça ile fırçalanır. Etki süresi kadar beklendikten sonra aletler solüsyondan çıkarılır, bol su ile durulanır. Etki süresi korozyonlu aletler için 5 dakikadır. Soğuk ve sıcak su ile kullanıma uygundur. Hazırlanan solüsyonun kullanım süresi 24 saattir. Fakat solüsyonun görüntüsünde kirlilik artışı olursa 24 saatten önce değiştiriniz.

Kimyasal İçerik

Fosforik asit, Noniyonik sürfaktanlar ve Koruyucular

Ambalaj

4x5L – 12x1L

El ve Cilt Antiseptikleri

DERHAND PLUS

- Kullanıma hazır
- Etanol bazlı
- Hoş kokulu
- Renksiz
- Sık sık kullanım için uygun
- 30 saniye de etkili
- Hassas cilt tipleri için uygundur
- Hipoallerjenik
- Cildin nemini korur
- El hijyeni en son standartlara uygundur



30sn
Etki süresi



Kullanım Alanı ve Amacı

Derhand Plus, hijyenik ve cerrahi el antisepsisi için kliniklerde, muayenehanelerde ve dental alanlarda kullanılır. Derhand Plus, alkol bazlı yapısı nedeniyle ellerdeki kontaminant bakterilerin ve diğer mikroorganizmaların en etkili ve hızlı biçimde antisepsisini sağlar. Cilt yumuşatıcı ve koruyucu etkilidir. Kullanıma hazır, sıvı formdadır.

Kullanım Şekli

Derhand Plus, hijyenik el antisepsisi için en az 3ml ele püskürtülür/sürülür ve EN 1500 standardına göre, 30 sn eller ovulur. Cerrahi el antisepsisinde ise en az 5ml ele püskürtülür/sürülür ve EN 12791 standardına göre, 3 dakika eller ovulur. Kuru ele uygulayınız.

Kimyasal İçerik

%70 Etil alkol, %5 İzopropil alkol, %0,1 Benzalkonyum klorür, Gliserin, Deiyonize su

Mikrobiyolojik Etkisi

Bakterisid, Virüsüd, Fungusid, Mikobakterisid, Tüberkülosid

Ambalaj

4x5L – 12x1L – 56x100ml – 36x250ml – 18x500ml



DERHAND

- Kullanıma hazır
- Propanol bazlı
- Hoş kokulu
- Renksiz
- Sık sık kullanım için uygun
- 30 saniye de etkili
- Hassas cilt tipleri için uygundur
- Hipoallerjenik
- Cildin nemini korur
- El hijyeni en son standartlara uygundur



30sn
Etki süresi



Kullanım Alanı ve Amacı

Derhand, hijyenik ve cerrahi el antisepsisi için kliniklerde, muayenehanelerde ve dental alanlarda kullanılır. Derhand, alkol bazlı yapısı nedeniyle ellerdeki kontaminant bakterilerin ve diğer mikroorganizmaların en etkili ve hızlı biçimde antisepsisini sağlar. Cilt yumuşatıcı ve koruyucu etkilidir. Kullanıma hazır, sıvı formdadır.

Kullanım Şekli

Derhand, hijyenik el antisepsisi için en az 3ml ele püskürtülür/sürülür ve EN 1500 standardına göre, 30 sn eller ovulur. Cerrahi el antisepsisinde ise en az 5ml ele püskürtülür/sürülür ve EN 12791 standardına göre, 3 dk eller ovulur.

Kimyasal İçerik

%70 İzopropil alkol, %0,1 Bütan(1-3)diol, Gliserin, Deiyonize su

Mikrobiyolojik Etkisi

Bakterisid, Virüsüd, Fungusid, Mikobakterisid, Tüberkülosid

Ambalaj

4x5L – 12x1L – 56x100ml – 36x250ml – 18x500ml



EL ANTİSEPSİSİ İŞLEMİ - EN 1500



Yeterli miktarda el antiseptiği avucunuzun içine alın, ardından diğer elinizin avuç kısmını antiseptik aldığınız elinizin avuç kısmıyla ovuşturun.



Sağ elinizin avuç kısmını sol elinizin üst kısmına koyun ve ovuşturun, ardından sol elinizin avuç kısmını sağ elinizin üst kısmına koyun ve ovuşturun.



Avuçlarınızı üst üste koyun ve parmak aralarınızı karşılıklı olarak ovuşturun.



Ellerinizi parmaklarınızın içine gelecek şekilde tutun, sıkıp gevşetin.



Sağ baş parmağınızı sol elinizle tutun ve dairesel hareketlerle ovalayın, aynı şekilde sağ elinizle sol baş parmağınızı ovalayın.




Sol elin parmaklarını sağ elin avuç içinde ovalayın, ardından aynı işlemi sol el için uygulayın.



Hijyenik Bir El Antisepsisi İçin;

- Ellerinizde yüzük ve saat olmamalı, tırnaklarınız kısa olmalı.
- El antiseptiğinden yaklaşık 3-5 ml (3-5 doz) kuru avuç içine alınız.
- Uygulama boyunca eller ıslak olmalı, eğer gerekiyorsa antiseptik ilavesi yapınız.
- Her bir adımdaki hareketi sonraki adıma geçmeden 5 kez tekrarlayınız.
- Hijyenik bir el antisepsisi en az 30 saniye sonunda gerçekleşir.


CERRAHİ EL ANTİSEPSİSİ İŞLEMİ - EN 12791

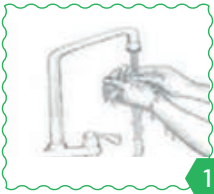


Elinize 1dk. süresince standart el yıkama prosedürlerine uygun olarak bir deterjanla yıkayınız.



Ellerinizi atılabilir / steril bir havlu ile kurulayınız.

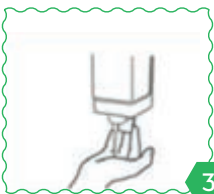

Dispenser kolunu dirseğiniz ile yönlendirerek avucunuza antiseptiği alınız.

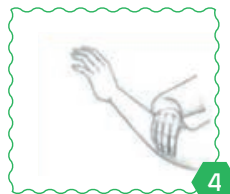

Dirseklerinizi içine alacak şekilde ellerinizi 3-5 dk. süresince ovalayarak dezenfekte ediniz.



Ellerinizi dezenfekte edecek şekilde işleme devam ediniz. Uygulama süresince ellerinizi ıslak tutunuz. Ellerinizi tamamen kuruyana kadar standart el ovalama prosedürünü takip ederek işleme devam ediniz



Dezenfeksiyon işleminden sonra ellerinizi kurulamayınız.

UYARI

Ellerinizi kuruduktan sonra eldiven giyiniz.